

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ

Практически нет ограничений в радиусе, диаметре и оптической силе контактных линз. Есть более чем сто различных моделей контактных линз, параметры которых можно менять индивидуально.

Линзы изготавливаются индивидуально для каждого глаза, таким образом можно достичь более высокую остроту зрения чем при очковой коррекции или при использовании мягких контактных линз.

Если сравнивать с очковой коррекцией, то в линзах картина, которую мы видим, не меняется, она более естественная и поле зрения намного шире. Изображение более четкое и стабильное, чем в обычных мягких контактных линзах.

Хорошо корригируется астигматизм. Даже при высоких степенях астигматизма, когда очковая коррекция не дает желаемого результата, в контактных линзах можно достичь остроту зрения 1.0 или 1.2.

При кератоконусе форма роговицы имеет индивидуально измененную форму. В этом случае необходимо произвести линзу специального дизайна, чтобы та не соприкасалась с роговицей глаза в самых тонких ее местах.

После LASIK (лазерная операция по коррекции зрения) форма роговицы также является видоизмененной, и обычные контактные линзы носить нельзя. По индивидуальным параметрам можно изготовить линзу со специальным послеоперационным дизайном. В этом случае контактная линза будет располагаться равномерно и можно добиться высокой остроты зрения.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ GP ЛИНЗЫ?

- Поддержание здоровья глаза на длительный срок
- Самые точные параметры контактных линз
- Высокая острота зрения
- Подходят при интенсивной работе за компьютером
- Возможны долгие часы ношения
- Подходят для здоровых роговиц любой формы
- Широкие возможности коррекции:
 - от +30.00 до -30.00 диоптрий;
 - коррекция всех возможных видов астигматизма;
 - коррекция кератоконуса;
 - коррекция после лазерных операций, LASIK и других операция на роговице.

Больше информация:

Gallus Optika

+371 29 151 040


+371 67 218 202

info@gallus.lv

www.gallus.lv

Ул. Антонияс 24, Рига, LV-1010

gallus
optika

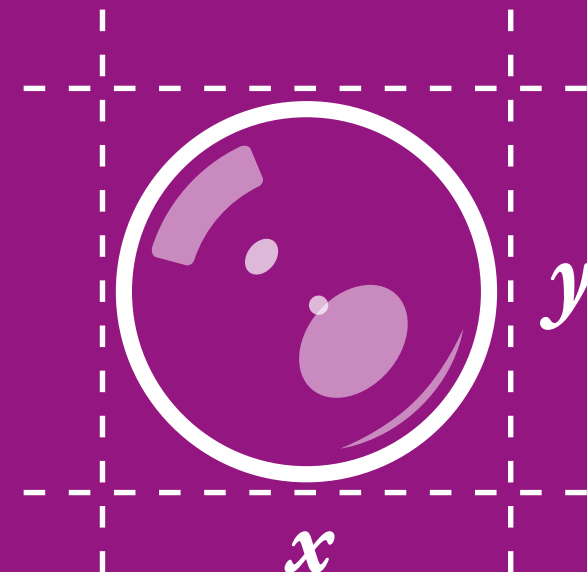

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ


ПЕРВЫЕ GP (газо проницаемые) ЛИНЗЫ?

Мы хотим, чтобы Ваши первые контактные линзы давали максимально возможную остроту зрения и были максимально комфортными, поэтому предлагаем уникальное решение.

Индивидуально изготовленные примерочные контактные линзы, которые можно использовать на протяжении 6-8 недель, стоять будут примерно также как обычные мягкие контактные линзы ежемесячной замены, но наши линзы будут изготовлены по индивидуальным параметрам.

У вас будет возможность привыкнуть за пару недель к новым линзам и потом уже сделать контактные линзы на более длительный период, внося необходимые коррекции в параметры при необходимости.

Как у нас, так и у Вас будет уверенность в оптимальных параметрах и лучшей коррекции.

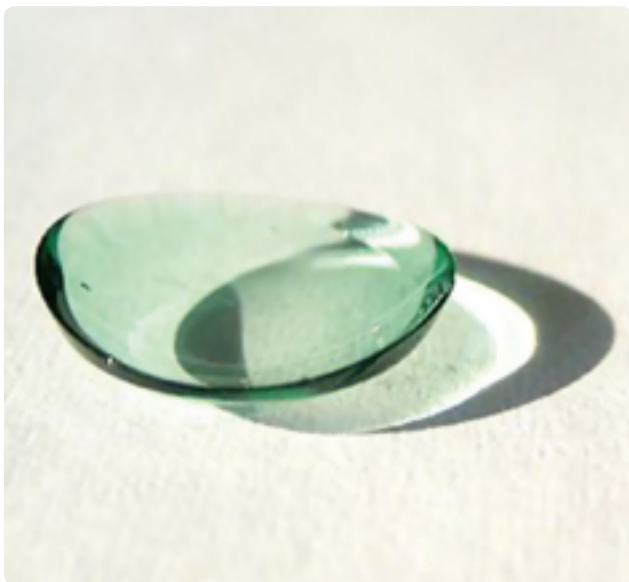

ПРИМЕРКА

Топография роговицы, которую мы получаем, основана на измирениях в 22 000 точках. Это самый точный метод по определению формы роговицы глаза и основа для правильного выбора дизайна линзы.

Выбор формы и параметров линзы почти не ограничен. Можно смоделировать линзы для самых сложных роговиц.

**Все параметры GP линзы
определяются индивидуально.**

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Форма и дизайн контактной линзы точно подбирается по форме роговицы глаза. Это обеспечивает правильное и равномерное движение линзы. Между линзой и глазом будет достаточное количество слезы, что обеспечит комфорт, натуральное увлажнение и защиту глаза. GP материалы более жесткие и их легче очистить и дезинфицировать, поэтому Ваши линзы всегда будут чистые.

Диаметр контактных линз значительно меньше, чем у обычных мягких линз – такой, какой необходим для ясного зрения!


Современные материалы обеспечивают высокую воздухопроницаемость, более высокую, чем обычные мягкие линзы. Дополнительно кислород доставляется вместе со слезой, так как линза сделана так, чтобы был непрерывный обмен слезы.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И КОМПЬЮТЕР

GP линзы более жесткие и имеют стабильную форму – им не нужно дополнительное увлажнение, чтобы сохранить свою форму. Работа за компьютером просит наибольшую концентрацию, поэтому люди моргают реже. С GP линзами не будет чувства сухости, а наоборот – слеза под контактной линзой обеспечивает увлажнение глаза.

СРОКИ И ЦЕНЫ

Цена зависит от вида контактной линзы, от специфики ее формы, от особенностей коррекции и отдельных дополнений. Индивидуальные линзы используются в течении 18-24 месяцев, если конечно бережно и правильно ухаживать за линзами. Но в любом случае, месячный объем затрат будет меньше, чем при использовании мягких контактных линз. Конкретный вид контактных линз, который необходим Вам, можно определить только после тщательной проверки зрения у нашего специалиста.

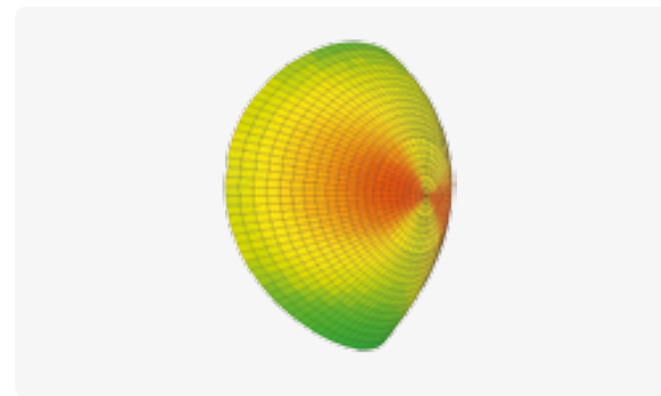

Топографическая модель роговицы